

Injekční stříkačka BD SafetyGlide™ Pro aplikování inzulínu, tuberkulinu a léků proti alergii

Injekční stříkačka pro aplikování inzulínu s trvale připevněnou jehlou			
Katalog #	Rozměry	Jehla	Balení
305930	1 mL	29G x 1/2"	100/krabička – 400/kartón
305932	1/2 mL	29G x 1/2"	100/krabička – 400/kartón
305934	1/2 mL	30G x 5/16" (TW)	100/krabička – 400/kartón
305935	3/10 mL	29G x 1/2"	100/krabička – 400/kartón
305937	3/10 mL	31G x 5/16" (TW)	100/krabička – 400/kartón
1 ml injekční stříkačka pro aplikování tuberkulinu s trvale připevněnou jehlou			
Katalog #	Rozměry/Jehla	Balení	
305945	27G x 1/2"	100/krabička – 400/kartón	
305946	26G x 3/8" (IB)	100/krabička – 400/kartón	
1 ml injekční stříkačka s trvale připevněnou jehlou v sadě pro alergika			
Katalog #	Rozměry/Jehla	Balení	
305950	27G x 1/2"	25/sada – 1000/kartón	
305951	26G x 3/8" (IB)	25/sada – 1000/kartón	

NEZAPOMEŇTE:

Bezpečně navržené výrobky jsou požadovány v sadách pro standardní procedury a personalizované procedury.

Více informací můžete získat
na telefonním číslem
1.888.237.2762

BD, logo BD a všechny další ochranné známky
jsou vlastnictvím firmy Becton, Dickinson and
Company, ©2013 BD.
BD 2/13-MSS0087



BD Czechia s.r.o.,
Křenova 438/1,
162 00 Praha 6,
Czech Republic
Tel: +420 235 315 564
Fax: +420 235 312 786
www.bd.com

3. Aktivace

Po aplikaci ihned aktivujte
rameno páčky a jedním prstem
ho posuňte dopředu.



Vizuálně se přesvědčte, že
bezpečnostní rameno je zcela
vysunuto dopředu a hrot jehly
je zcela zakryt.

Po jednorázovém použití
vyhodte injekční stříkačku
s jehlou do příslušné nádoby
na odpad s hroty.



Nezapomeňte...

Zásadní je aseptická technika a příslušná příprava pokožky v
místě vpichu. Dodržujte firemní politiku, která se týče postupu při
likvidaci zdravotnického odpadu.



Helping all people
live healthy lives

Injekční stříkačka BD SafetyGlide™

Pro aplikování inzulínu, tuberkulinu
a léků proti alergii

Jak používat injekční stříkačku BD SafetyGlide™ pro aplikování inzulínu, tuberkulinu a léků proti alergii.

1. Aspirace

Otočte bezpečnostní úchyt,
aby byla viditelná stupnice.



Propíchněte ampulku uprostřed,
aby se minimalizovala možnost
ohnutí jehly.
Připravte lék podle schváleného
protokolu.



2. Aplikace

Pro usnadnění aplikace v malém
úhlu otočte bezpečnostní úchyt
tak, aby byl nastavený na šikmý
řez jehly. Aplikujte lék podle
schváleného protokolu.



Injekční stříkačka doporučená pro malé dávky léku

Injekční stříkačka BD SafetyGlide™ pro aplikování inzulínu, tuberkulinu a léků proti alergii byla speciálně navržena a kalibrována pro menší dávky léku. Má trvale připevněnou jehlu a pomáhá splnit unikátní potřeby zdravotnických pracovníků, kteří aplikují takové typy vstříků.

Podobně jako celá řada bezpečně navržených produktů BD SafetyGlide™ pomáhá injekční stříkačka BD SafetyGlide™ pro aplikování inzulínu, tuberkulinu a léků proti alergii zvýšit efektivitu léčby a komfort pacienta.



Obecně platí, že tato kolekce bezpečných výrobků pomáhá uspokojit nejrůznější klinické potřeby. Charakteristickým rysem portfolia je chráněná hypodermická jehla BD SafetyGlide™ Shielding Hypodermic Needle – bezpečné zařízení ovládané jednou rukou, které lze přizpůsobit pohodlné injekční stříkačce různých rozměrů.

Stříkačka BD SafetyGlide™ pro aplikování inzulínu, tuberkulinu a léků proti alergii

Před aktivací

Trvale připevněná jehla

Navržena tak, aby mrtvý prostor byl minimální

Otáčivé bezpečnostní rameno

Umožňuje nastavit zařízení na šikmý řez jehly a injekci aplikovat pod malým úhlem



Jehla vyrobená technologií BD PrecisionGlide™

Navržena pro pohodlí pacientů

Průhledný válec

Zajišťuje přesné dávkování

Po aktivaci

Bezpečný a viditelný samočinný zámek

Po aktivaci je hrot jehly bezpečně chráněn

Aktivace jednou rukou

Bezpečnostní rameno je aktivováno jedním pohybem prstu



Vlastnosti a výhody pro zdravotnické pracovníky a jejich pacienty

Jehla vyrobená technologií BD PrecisionGlide™

- Navržena pro pohodlí pacientů
- Vedoucí značka v oblasti technologií hypodermických jehel v USA

Aktivace jednou rukou

- Prakticky bez změn v technice
- Vyžaduje minimální proškolení
- Prst zůstává po celou dobu za jehlou

Osvědčená spolehlivost

- Bezpečný a viditelný samočinný zámek
- Po aktivaci prakticky nedochází k rozstříku obsahu

Navržena s ohledem na účinnost

- Trvale připevněná jehla byla navržena tak, aby mrtvý prostor byl minimální
 - s ohledem na co nejmenší ztrátu léku
- Otáčivé bezpečnostní rameno umožňuje vpich pod malým úhlem